

Visiere protection

 Romain



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Visiere_protection

Dernière modification le 09/04/2020

 Difficulty Very easy

 Duration 5 minute(s)

 Cost 0 EUR (€)

Description

visière protection pour se protéger des gouttelettes pour lutter contre l'épidémie de covid-19

Summary

Contents

Description

Summary

Step 1 - préparer les bandes de pvc

Step 2 - Pliage + agraphes

Step 3 - Feuille transparente

Step 4 - Elastique

Comments

Materials

bandes de PVC
trombones
élastique

Tools


cutter
agrafeuse

Step 1 - préparer les bandes de pvc

On prépare 2 bandes de pvc de 45cm (à ajuster selon le tour de tête)


Step 2 - Pliage + agrafes

On plie le tout et on met un coup d'agrafeuse

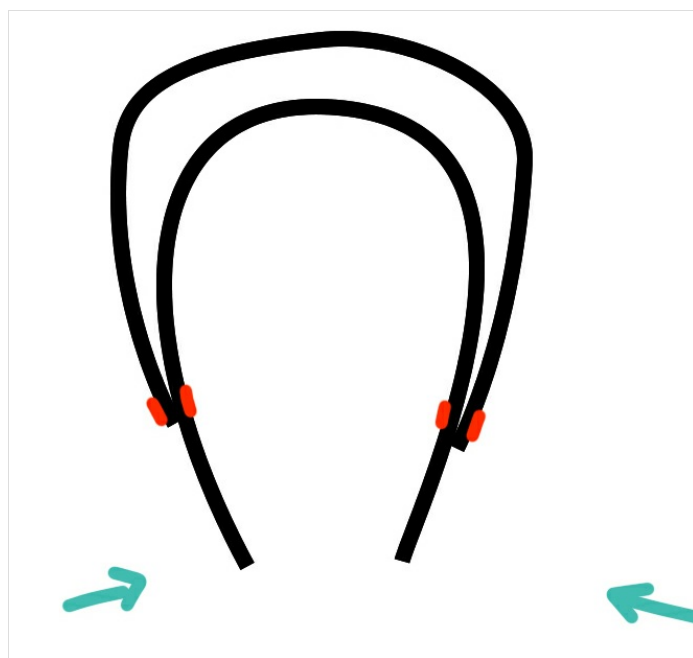

Step 3 - Feuille transparente

on rajoute des trombones pour la feuille transparente

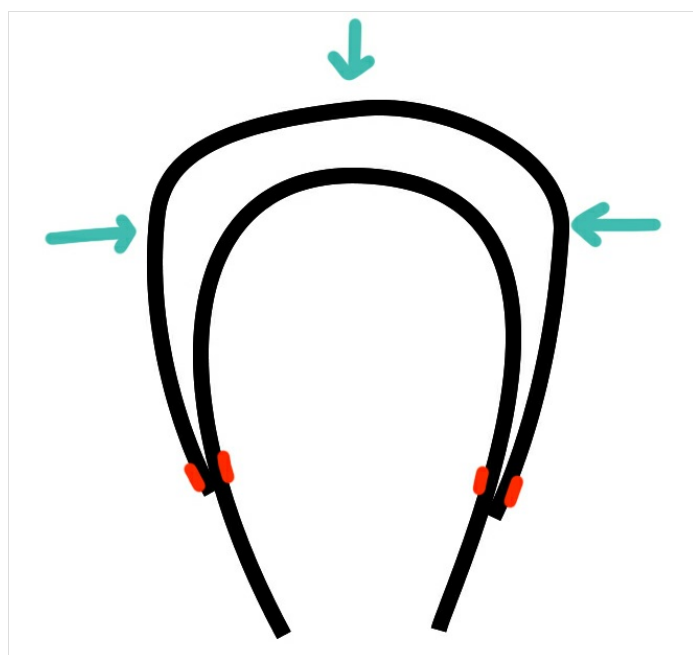

Step 4 - Elastique

On fixe l'élastique avec une agrafe

